




# Anleitung FeedScan App

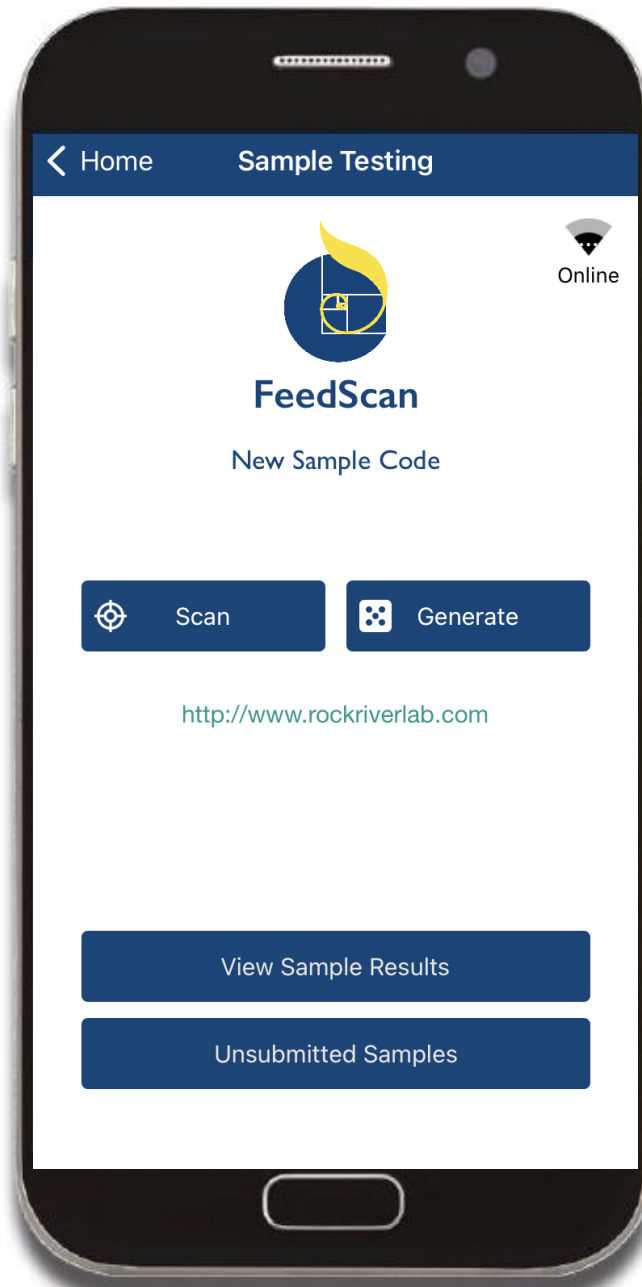

# 1. Installation

Laden Sie die FeedScanApp aus dem App Store oder Google Play indem Sie die QR-Codes rechts nutzen.

Download der Android App



Download der iOS App



# 2. Anmelden

Loggen Sie sich in die FeedScanApp ein, indem Sie Ihr Rock River Laboratory Login und Passwort nutzen. Sollten Sie noch keinen Login und Passwort haben, melden Sie sich bei Rock River Laboratory Europe unter +49 38758 35657 oder info@rockriverlab.eu.

Sign In For Additional Features

User Name

Password


**Login**

www.rockriverlab.com

# 3. Option A

Nutzen Sie Option A, wenn Sie einen von uns gestellten Barcode auf den Probenbeutel kleben.

Drücken Sie "Scan", scannen Sie den Barcode und drücken Sie "Submit".

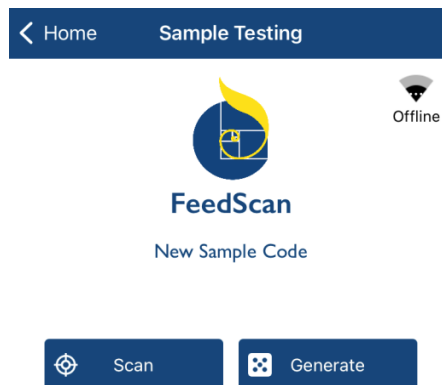

# Option B


Nutzen Sie Option B, wenn Sie den 8-stelligen Code auf den Probenbeutel schreiben.

Drücken Sie "Generate" um einen eindeutigen Code zu generieren, schreiben Sie diesen Code mit einem wasserfestem Stift auf den Probenbeutel und drücken Sie "OK"

z.B. 2AE-F47-JR

# 4. Wählen Sie den "Dealer"

Entscheiden Sie sich für den Account, der die Probe bezahlt.

< Sample Testing Dealer 


Rock River Laboratory Europe GmbH

Meyer GbR

## 5. Wählen Sie die "Farm"

Wählen Sie den richtigen Betrieb aus der Liste "My Farms" und drücken Sie "Next". Oder generieren Sie eine neue Farm indem Sie die Textbox im unteren Bereich nutzen. Mit der Abfrage "Save the Farm" kann die Farm gespeichert werden.

Optional kann für bestimmte Rationsberechnungsprogramme eine Nummer in dem Feld "Number" vergeben werden.

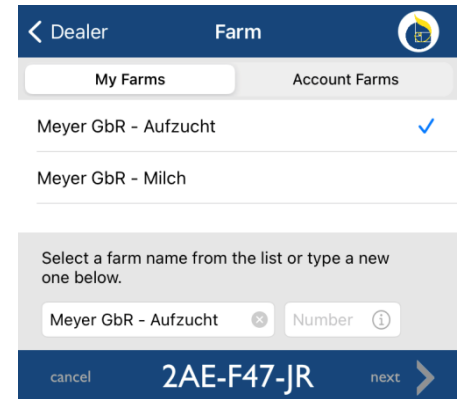

## 6. Probenbeschreibung

Wählen Sie eine Probenbeschreibung von der Liste aus oder generieren Sie eine neue Probenbeschreibung, indem Sie das Textfeld im unteren Bereich nutzen. Mit dem drücken des "Next" Taste erhalten Sie die Möglichkeit die Probenbeschreibung für das nächste Mal zu speichern.


Wenn Sie Durchschnittswerte für diese Analyse erhalten wollen, wählen Sie mit "+" und "-" neben "Samples in average" die gewünschte Anzahl der Werte im angezeigten Durchschnitt. Mit dem Wert Null wird kein Durchschnitt angezeigt. Wählen Sie z.B. 3 werden die letzten 3 Analysen im Durchschnitt angezeigt.

Über die Angabe "Crop year" wird das Erntejahr definiert.



## 7. Zusatzinformationen

Mit der "Info" Anzeige können zusätzliche Informationen angegeben werden. Nutzen Sie "Next", um zur nächsten Auswahl zu gelangen.

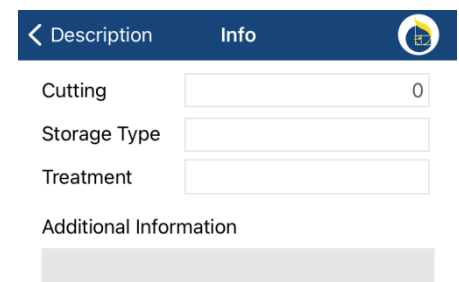


## 8. Analyseauswahl


Wählen Sie das gewünschte Analysepaket(e) und senden Sie die Daten mit "Submit" zum Labor. Die Daten sind jetzt gespeichert und die Futterprobe kann an Rock River Laboratory Europe, Ernst-Thälmann Straße 13, 19294 Neu Kaliß gesendet werden.

Nutzen Sie "Cancel" um ohne zu speichern und Daten zu übertragen zurück zum Anfang zu gelangen.

Vor der Datenübertragung kann mit der Funktion "Review" eine Zusammenfassung angesehen werden.

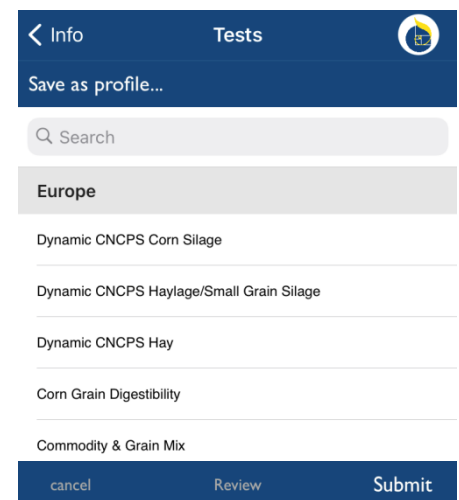

# FeedScanApp Tipps und Tricks

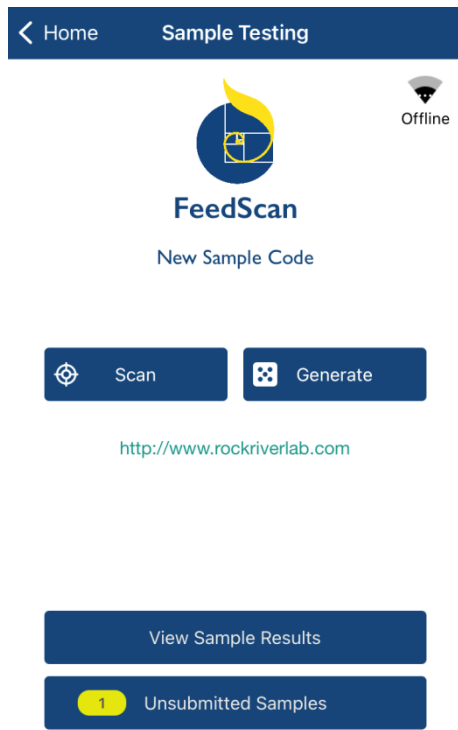

## "Funkloch"

Mit der Funktion "Unsubmitted samples" werden Informationen zu Proben übertragen, die erfasst wurden, als kein Internetzugang verfügbar war. Diese Funktion zeigt alle nicht übertragenen Proben an.


## Ergebnisse ansehen

Unter dem Punkt "View Sample Results" werden alle Proben angezeigt, die zu Ihrem Account gehören. Sie können sowohl grafisch (Zeitachse) als auch tabellarisch (Einzelprobe) als PDF angesehen werden.

Für die tabellarische Ansicht müssen Sie auf den Betriebsnamen drücken und für die grafische Ansicht auf die Darstellung vom Säulendiagramm. Die grafische Darstellung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn mindestens 2 Proben unter einer gespeicherten Beschreibung analysiert wurden.



### Grafische Darstellung

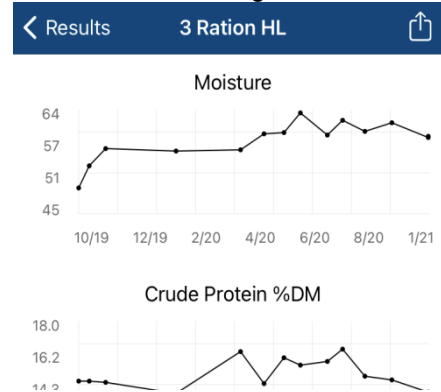

### Tabellarische Darstellung

Description (%DM unless specified)	Dry Matter Basis	60 Day Avg	90 Day Avg
Dry Matter	21.95	32.8	34.9
Crude Protein	17.79	17.6	17.1
Total Amino Acid	17.66	15.4	14.9
Lys %CP	5.84	5.16	5.09
Met %CP	1.95	1.63	1.61
His %CP	2.21	1.96	1.93
Soluble Protein, %CP	41.29	45.6	49.0
Anal. Crude Protein	17.23	17.0	16.6
ADCP	0.55	0.596	0.552
NDKCP	2.38	2.12	2.16
ADKCP %CP	3.10	3.36	3.34
ADF	30.57	31.1	31.3
aNDF	47.92	48.5	48.9
aNDFom	47.07	43.2	43.4
Calcium	0.68	0.485	0.619
Phosphorus	0.34	0.325	0.321
Magnesium	0.30	0.219	0.255
Potassium	2.74	2.64	2.48
Sulfur	0.25	0.232	0.237
Fat (EE)	4.18	3.70	3.66
Total Faty Acid	2.29	2.01	1.91
Monoc (C18:0) %FA	1.41	1.42	1.38
Palmitic (C16:0) %FA	15.95	15.8	14.2
Stearic (C18:0) %FA	1.83	1.31	1.31
Oleic (C18:1 n-7) %FA	10.85	7.58	5.63
Linoleic (C18:2 n-6) %FA	29.79	26.1	24.7
Linolenic (C18:3 n-3) %FA	39.93	41.0	45.0
NSP	80.57	74.8	75.4
Ash	18.65	9.77	9.71
Lignin	5.08	5.14	4.69
Sugar (ESC)	NDP	3.42	5.44
Sugar (NSG)	0.28	4.19	8.23
Starch	0.57	1.63	1.29
Fermentation Products			
Lactic Acid	8.51	5.36	5.26
Acetic Acid	3.20	2.17	1.59

## Betriebe organisieren

Haben mehrere Berater Zugang zu einem Account und senden für unterschiedliche Betriebe Proben ein, können die Berater sehr einfach Ihre eigenen Betriebe organisieren, und Betriebsinformationen mit Ihren Kollegen teilen. Im "Farm" Menü sind diese unter "My Farms" aufgelistet. Nutzen Sie "Account Farms" um alle zum Account gehörigen Farmen anzusehen. Um eine Farm hinzuzufügen, tragen Sie den Namen des Betriebes ein und durchlaufen Sie den ganzen Probenanmeldeprozess. Danach ist der Betrieb unter "My Farms" gespeichert. Ihre Kollegen finden den neuen Betrieb unter "Account Farms".

Betriebe, die unter "My Farms" gelistet sind können durch Wischen (Apple) oder langes Drücken (Android) gelöscht werden..

